

Велотренажер с электродвигателем HSM-50CE педальный



Педальный тренажер с электродвигателем HSM-50CE предназначен для разработки верхних и нижних конечностей больных в период реабилитации или инвалидов. Тренажер используется для вращательных упражнений рук или ног. Педали в этом тренажере крутятся самостоятельно, тем самым заставляя ноги (руки) работать. Тренажер работает как в обычном режиме так и реверсионном (назад). Не может использоваться как активный тренажер, только пассивная разработка мышц. **Педальный велотренажер с электродвигателем HSM-50CE** не работает с выключенным двигателем, не предназначен для активной тренировки как на обычном тренажере. Активное давление на педали недопустимо.

Перед подключением провода тренажера к сети обязательно убедитесь в том, что кнопка (тумблер включения тренажера на корпусе) находится в выключенном положении. После окончания занятий сначала выключите тумблер, а после отсоедините тренажер от сети. Данное оборудование не считается медицинским на него имеются только сертификат соответствия.

Педальный велотренажер с электродвигателем HSM-50CE выполнен из белого пластика. Педали тренажера со специальными липучками которые фиксируют ногу. **Педальный велотренажер HSM-50CE** может использоваться как для рук, так и для ног. Самое удобное положение для занятия на тренажере - сидя.

Характеристики педального велотренажера с электродвигателем

- автоматическая программа вращения,
- упражнения для ног и рук,
- вращение педалей в прямом и обратном направлении,
- съемный информативный ЖК-дисплей управления,
- программируемое время тренировки.

Длина педального велотренажера	39 см
Высота педального велотренажера	28 см
Ширина педального велотренажера	42 см
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Мощность педального велотренажера	70 Вт
Вес	4,4 кг

Управление пультом

1. Подсоедините велотренажер к электрической сети и включите выключатель, он издаст звуковой сигнал и покажет "n6" в течение 1 секунды, затем покажет всю информацию в течение 1 секунды. После этого экран выключится.

2. Нажмите кнопку включения, он включится в "ручной" режим и покажет следующее:

- Speed (скорость): 0.0
- Distance (расстояние): 00
- Time (время): 03
- Mode (режим): 0
- Мотор не будет работать, если установлена скорость 0.0

3. Если педальный велотренажер не используется в течение 10 секунд после включения, экран выключится.

4. Нажмите кнопки скорости, чтобы выбрать уровень скорости от 1 до 12. Нажмите кнопки времени, чтобы выбрать время (3, 6, 9, 12 или 15 минут). Нажмите кнопку направления, чтобы выбрать направление.

5. Нажмите кнопку режима работы, чтобы выбрать режим. Предусмотрено 5 программ. 0 означает "ручной" режим, 1~5 - автоматические программы.

6. При выборе автоматической программы, время каждой программы равно 15 минутам. Пользователь не может изменить скорость, время, направление во время работы автоматических программ.

7. Во время работы велотренажер может быть приостановлен кратким нажатием на кнопку включения. Но, если вы нажмете кнопку включения и удержите её 2 секунды, велотренажер выключится.

8. Когда велотренажер приостановлен, вы можете ещё раз кратко нажать кнопку включения, чтобы возобновить его работу. Но, если вы нажмете кнопку включения и удержите её 2 секунды, велотренажер выключится.

9. Когда мотор включен, но скорость не определяется в течение 5 секунд, велотренажер выключится автоматически.